

Инструкция


по забору крови для проведения Расширенного Исследования цодНК+РНК (Жидкостная Биопсия)

Забор крови для исследования рекомендуется:

- в течение 2 дней после проведения химиотерапии
- в течение 1 дня (на следующий день) после лучевой терапии

Предварительный приём пищи не влияет на качество проводимого теста. Таким образом, для данного теста отсутствует требование сдачи крови натощак. Время суток для сдачи крови также не имеет ограничений.

1

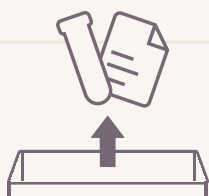

Извлеките содержимое коробки

2



Направительный бланк и информированное согласие заполняется процедурной медсестрой и подписывается пациенткой

3



Проверьте срок годности пробирки

4

>8 мл



Венозная кровь забирается в пробирку. Объем собранного материала должен составлять **не менее 8 мл**

5

Так как система для забора крови вакуумная, то **открывать пробирку ни в коем случае нельзя.**

Пробирку обязательно подписать, указав:

- ФИО пациентки,
- дату рождения,
- дату забора крови.

6


10 раз



После забора крови пробирку перевернуть **10 раз** для перемешивания образца с консервантом

Чтобы снизить риск гемолиза переворачивать пробирку необходимо аккуратно.

7

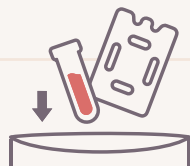

Промаркированную пробирку с кровью поместить **в термопакет вместе с гелем** для поддержания температурного режима.

Все заполненные документы убрать обратно в коробку.

8

10°C ~ 25°C

Хранить и транспортировать образец при комнатной температуре 10°C ~ 25°C.

**! НЕ ОХЛАЖДАТЬ
И НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ
■ ПРОБИРКУ!**

9

<3 дней

Доставка образца в лабораторию должна быть осуществлена **не позднее 3 дней** с момента забора крови

